

# MELISEPTOL® CÉLZOTT FERTŐTLENÍTÉS



## TULAJDONSÁGOK

### Meliseptol®

- A glioxáltartalmú Meliseptol® továbbfejlesztett változata
- Tökéletesített tisztítóhatás, fényes fémfelületeken is
- Kiegészítő antimikrobiális összetevők nélkül (mint pl. aldehidek, kvaterner-ammónium vegyületek)
- Kellemes, citromos illat
- Gyors és széles körű hatásspektrum, többek között mykobaktericid és burok nélküli vírusokkal – rota-, adeno- és norovírus – szemben virucid
- Kompatibilis a B. Braun Wipes kendőkkel



hatékony



gyors



környezetbarát

ÚJ



## MELISEPTOL® ... új összetétel a gyors felületfertőtlenítés érdekében

### Indikáció

A Meliseptol® Új formula egy kiemelten hatékony fertőtlenítőszer közepes alkoholkoncentrációval nem invazív orvosi eszközökhöz és orvosi berendezésekhez (pl. vizsgálószékek, kórházi ágyak, műtőfelszerelések) és egyéb felületekhez. Különösen alkalmas fényes fémfelületek és nehezen elérhető felületek fertőtlenítésére. A Meliseptol® új összetételű változata aldehid- és kvaterner-amónium vegyületektől mentes, és kizárólag etanolt tartalmaz mint antimikrobiális hatóanyag.

### Hatásspektrum

Mikroorganizmusok	Behatási idő
Baktericid / Levurocid	1 perc
Mykobaktericid Tuberkulocid	1 perc 1 perc
Szelektív virucid (beleértve HBV, HCV, HIV, vaccinia vírus, BVDV)	30 mp
Virucid (burok nélküli vírusok) - rotavírus - adenovírus - norovírus	30 mp 30 mp 30 mp

(Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak.)

Meliseptol® – alkalmazott vizsgálati módszerek:  
Baktericid / fungicid hatás: EN 13697  
Mykobaktericid hatás: EN 14348  
Burkos vírusok: DVV / RKI\*  
Virucid hatás: EN 14476

\*DVV (Német Virusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelvének megfelelően

Kiszerezés	Cikkszám
Hengerpalack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19764
Téglapalack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19761
Szórófej hengerpalackhoz	3908012

### Fiziko-kémiai adatok

Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék  
Sűrűség (20 °C): kb. 0,98 g/ml  
Gyulladáspont (DIN 51 755): + 31 °C  
Illatanyag: kellemes (minimális illatanyag-tartalom)

#### Meliseptol®

100 g oldat tartalma: 44 g etanol, <5% felületaktív anyag, illatanyag, tisztított víz  
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerokről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nemionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: lásd az anyagbiztonsági adatlapot

Figyelmeztetés: A fertőtlenítő használatát során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a termékétajékoztatót használat előtt! Ne használja a terméket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

### Alkalmazási útmutató

Fertőtlenítse kezeit és húzzon kesztyűt használat előtt.

- Ügyeljen a gyúlékony folyadékok használatának egészségügyi és biztonsági előírásaira.
- Ellenőrizze az anyagkompatibilitást (pl. akrilüveg felületen alkoholos szer általában nem használható).
- Az elektronikus eszközöket fertőtlenítés előtt kapcsolja ki! Ha ez nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy fertőtlenítés közben nem lehetséges a készülék beindítása. A forró felületeket fertőtlenítés előtt hagyja lehűlni.
- Felületek fertőtlenítése, ha nincs látható szennyeződés:
  - Oszlassa el a fertőtlenítőt a felületen. Lehetőleg egyszer használatos kendőt alkalmazzon, amelyet átítatott Meliseptol® oldattal. Használja a szórófejes kiszerezést azokon a felületeken, ahol törítés nem lehetséges. Ne juttassa a szert a készülékek nyílásaiba.
  - Tartsa nedvesen a felületet a kívánt behatási idő eléréséig.
  - Ne törölje szárazra a felületet.
- Látható kontamináció esetén a fertőtlenítés két lépésben végzendő:
  - Először távolítsa el a szennyeződést Meliseptol® oldattal átítatott, egyszer használatos kendővel,
  - majd a fentiekben leírtak szerint végezze el a fertőtlenítést.

ÚJ FORMULA

